

GEBRUIKERSADVIES

Om in geval van klachten en/of symptomen de meest nauwkeurige uitslag te verkrijgen, adviseren wij deze test/indicator 2 à 3 keer te herhalen in een tijdsbestek van 9 tot 14 dagen. Dit is noodzakelijk omdat deze meetmethode antilichamen opspoot in het bloed. Het kan dus zo zijn dat u al wel besmet bent geraakt, maar dat de test dit op het moment nog niet signaleert. De reden hiervan is dat het lichaam nog bezig is met het aanmaken van de antilichamen. Het aanmaken van antilichamen gebeurt zodra het virus het lichaam binnenkomt. Het ene lichaam maakt heel snel de antilichamen aan, het andere doet er iets langer over. Door een tweede en/of een derde test te doen realiseert u een veiliger, nauwkeuriger resultaat omdat de minimale meetwaarden dan (nagenoeg) altijd gehaald worden. Bij een meerderheid van de mensen zijn de antilichamen pas na 5 dagen in het bloed meetbaar.

Tot wanneer zijn de antilichamen zichtbaar in het bloed?

Tot wanneer deze vindbaar zijn, is voor ieder lichaam anders. Dit kan variëren van een paar weken tot een aantal maanden. De antilichamen IgG worden door de test gemeten in het bloed. Deze tonen aan dat u in het verleden besmet bent geweest met het virus.

Hoe doe ik de test?

Lees voor gebruik de ingesloten handleiding uitvoerig. Voor een uitgebreide instructievideo kunt u de QR-code scannen (dit gaat gemakkelijk door de code te scannen met de camera van uw smartphone en dan op de "link" te klikken) of gaat u naar www.emdacare.nl.

Wat doe ik bij een positieve uitslag?

In geval van een andere uitslag dan 1 streepje (U heeft de test correct uitgevoerd en er zijn geen antilichamen IgG en/of IgM aangetroffen) adviseren wij u contact op te nemen met de GGD of een andere zorgprofessional. Deze test dient beschouwd te worden als een goede indicator maar geeft als gezegd geen garantie daar de aanmaak van antilichamen per persoon verschilt.

Hoe betrouwbaar is de test?

De test is een indicatie en dient ook op die manier gebruikt te worden. Het testen is een moment opname, één test is geen test. Wij adviseren de test 2 à 3 x te herhalen in 9 dagen tijd en erna 1x per week. Bij twijfel neemt u altijd contact op met de GGD. De test is CE-gekeurd en er liggen meerdere testrapporten aan ten grondslag.

Bron vermelding:

- Doherty Institute COVID-19 study (13th October)
- New York Blood Centre Research confirms effectiveness of Rapid Serological Test for COVID-19 (26/8/2020)

